



Vyhřívaná miska VMO-06

Vyhřívaná miska VMO-06



slouží k ohřevu aplikačních roztoků při operačních zákrocích. Aplikační roztoky se používají zejména k výplachu tělních dutin, ran a dále k přípravě roušek a obkladů např. pro zastavení kapilárního plošného krvácení.

Vyhřívaná miska se skládá z pětiramenného výškově nastavitelného pojízdného stojanu, vyhřevného tělesa s regulací teploty a vlastní nerezové misky. Nerezový pěti-ramenný stojan je osazen antistatickými pojezdovými kolečky o průměru 60 mm, z toho tři jsou vybavena brzdou.

Miska je zhotovena z kvalitního nerezového materiálu, dno je zesílené pro zlepšení tepelné stability. Misku lze jednoduše vyjmout z přístroje a sterilizovat.

Ohřev vodní lázně pomocí zabudovaného topného tělesa, zajišťuje mikroprocesorový regulátor s přesností ± 1 °C v rozsahu 30-90 °C. Nastavení teploty na požadovanou hodnotu se provádí pomocí dotykové klávesnice v krocích po 1 °C nebo 5 °C.

Pro zajištění vysoké bezpečnosti je přístroj vybaven nezávislým mechanickým termostatem proti přehřátí.

Nastavenou teplotu zobrazuje LED displej, o aktuálním provozním stavu přístroje informují optické indikátory.

Autodiagnostika přístroje nepřetržitě kontroluje provozní parametry a správné funkce přístroje. V případě odchylky od nastavených parametrů nebo poruchy je aktivován opticko-akustický alarm. Jedná-li se o závažnou poruchu dojde k bezpečnému vypnutí přístroje. Pro servisní diagnostiku je přístroj vybaven USB portem umožňující připojení k PC.

Součástí přístroje je konektor k připojení pro vyrovnání el. potenciálů.





Technické parametry

▪ Třída ochrany přístroje	I	
▪ Napájení	230/50	V/Hz
▪ Příkon	max. 1200	W
▪ Hmotnost (bez náplně)	9	kg
▪ Ohřev	v rozsahu 30-90	°C
▪ Krok regulace teploty	krátkým stiskem klávesy po 1 dlouhým stiskem klávesy po 5	°C °C
▪ Přesnost	± 1	°C
▪ Kapacita náplně	4	l
▪ Signalizace	opticky / akusticky	
▪ Nastavitelná výška	90 - 120	cm
▪ Rozměry	55 x 55 x 105	cm



Alfamedic s.r.o

Tř. 5.května 458/35, 37372 Lišov, Czech Republic

T: 387 994 664

alfamedic@alfamedic.cz, www.alfamedic.cz